


 **Innan du använder bänken: Se till att alla skruvar är åtdragna samt att linorna och träkonstruktionen är oskadade.**

 **Se till att varken du eller din klient belastar huvudstöd eller armstöd med hela kroppstyngden.**

 **Kliv alltid av och på bänken från mitten**

Montering av bänk



- Lagg bänken på sidan med handtagen uppåt och tag ur tillbehören.
- Lyft upp bänken i hantagen till upprätt position.
- När bänken står upprätt: Tryck ned bänken i mitten och se till att linorna är sträckta och att benen står på samma nivå.


Montering och justering av tillbehör



- Huvudstödet består av en dyna med justerbart underrede samt en hållare för armar som enkelt monteras med kardborreband.
- En snabbkoppling ger möjlighet att ställa huvudstödet vinkel samt att höja och sänka det vertikalt.
- För optimal stabilitet kan axeln i snabbkopplingen behöva justeras. Använd insexnyckel 5 mm.

• **Sidoarmstöden** trycks in i hålen på sidan av bänken och ger en komfortabel position för armarna.

• **Justering av bänkens höjd.** Genom att skruva bort träknopparna kan benens längd justeras så att bänkens ovansida får höjden 57-83 cm.

 Se till att träknopparna är åtdragna innan användning



Förvaring

- Fäst tillbehören i spännbanden under bänken. Förvara alltid bänken i väskan när den inte skall användas under en längre tid.
- Se till att bänken förvaras svalt och utsatt inte bänken för direkt solljus, fukt eller extrema temperaturer.



• Bredd: 50 & 60 cm • Längd (med huvudstöd) 196 cm • Vikt 12 respektive 13,5 kg • Höjd 57-83 cm • Färger: Vit, vinröd, blå (Aluminiumbänken). Medföljande tillbehör: Ställbart huvudstöd, armhållare, sidoarmstöd och väska.